

Návod na použití odběrových souprav pro virologické vyšetření

(Diagnostika chřipky sezónní i pandemické, nechřipkových virů, enterovirů..)

Součásti odběrové soupravy: 2 sterilní výtěrové tampóny
zkumavka s odběrovým médiem

Soupravy na požádání dodáme: tel.: 266 082 637, 266 082 622, 266 082 666
296 394 637, 296 394 622, 296 394 666

Postup při odběru nazofaryngeálního výtěru:

1. Při manipulaci s odběrovou soupravou dodržujte přísně sterilní podmínky.
2. Odběr provádějte co nejdříve od začátku onemocnění (2.-3. den), nejlépe po ránu - na lačno před hygienou ústní dutiny a podáváním léků.
(některé chemikálie znemožňují interpretaci rychlých laboratorních testů).
3. Výtěr se provádí dvěma tampóny – prvním vytřete obě nosní dírky a druhým velmi důkladně setřete epiteliální buňky zadní stěny nosohltanu. Doporučuje se předem nechat pacienta 2x zakašlat. Vložte oba tampóny do jedné zkumavky s odběrovým médiem. Odstříhňte konce tampónů aniž byste se dotkli okraje zkumavky a pevně uzavřete.

Nedotýkejte se jazyka, patrových oblouků a tonzil !

4. Zkumavku řádně označte štítkem se jménem a rodným číslem pacienta.
Na žádance o vyšetření shodně vyplňte jméno a rodné číslo pacienta, kód zdravotní pojišťovny, datum a hodinu odběru, popř. symptomy a terapii. Velmi důležité je jméno lékaře, IČZ a telefon, na který lze hlásit výsledky laboratorního vyšetření.
5. Vzorky je třeba odeslat ke zpracování do laboratoře co nejdříve.

Pokud nelze zajistit okamžité zpracování vzorků, lze je uchovat až 48 hodin při 2-8°C. Pro delší uchování je udržujte při teplotě nižší než -70°C. Zásadně neskladujte při -20°C!

Tato teplota zhoršuje životaschopnost virů a znemožňuje případnou konfirmaci pozitivního výsledku a další typizaci viru.